



## Annexe

### Échantillons respiratoires à acheminer au LSPQ dans le cadre de la surveillance des virus de l'influenza en début de saison

<b>Quel type d'échantillon ?</b>	Tout échantillon qui s'avère positif pour l'influenza A peu importe la méthode de détection utilisée.
<b>Quoi envoyer ?</b>	Les restes des spécimens cliniques dans leurs tubes d'origine ou transférés dans des microtubes, et conservés préférentiellement congelés.
<b>Combien ?</b>	Les 5 premiers positifs pour l'influenza A.
<b>Quand les envoyer ?</b>	Envoyer dans les envois réguliers les 5 premiers échantillons détectés positifs à partir du 1 <sup>er</sup> octobre 2023
<b>Comment les envoyer ?</b>	Sur sachet de glace (ice-pack) ou congelés sur glace sèche.
<b>Un rapport sera émis ?</b>	Oui, pour la détection et le sous-typage.
<b>Quoi inscrire sur la requête du LSPQ ?</b>	<p><u>SVP utilisez la requête <b>PHAGE</b> :</u></p> <p>Choisir l'analyse : Influenza A et B : détection TAAN sur spécimen clinique.</p> <p>Au champ 'Prescripteur' : inscrire le nom du médecin microbiologiste ou du coordonnateur technique du laboratoire.</p> <p>Au champ commentaire : SVP inscrire quel test a été utilisé et la valeur de Ct si disponible.</p>

Merci !