Schéma du pré-nettoyage¹, inspection sommaire et transport des DM contaminés

En dehors des heures ouvrables de l'URDM

Étapes de retraitement exécutées par le bloc opératoire

Pendant l'intervention

- Éliminer immédiatement les traces évidentes de souillures sur DM
 - → Si DM avec lumière : rincer immédiatement avec de l'eau stérile
 - → Si DM défectueux : mettre à part et assurer le cheminement de cette information

À la fin de l'intervention

- Trier les DM
 - → Retirer les objets pointus/tranchants à usage unique et en disposer dans les contenants
 - → Vider les contenants réutilisables de leur contenu, s'il y a lieu
 - Mettre à part :
 - les DM pointus/tranchants réutilisables
 - les DM délicats
 - les DM non immersibles
 - → Placer les instruments DM lourds au fond des plateaux

Local de pré-nettoyage

- Déposer les DM dans une solution de trempage (eau + détergent enzymatique)
- Brosser les DM
- Irriguer les DM avec lumière
- Rincer les DM
- Assécher les DM
- Placer les DM dans un contenant/chariot de transport
- Retirer les EPI et effectuer une hygiène des mains

Durant le transport vers l'URDM

À l'ouverture de l'URDM, acheminer les DM vers l'URDM ou cueillette par PRDM

Étapes de retraitement exécutées par l'URDM

- Reprendre l'étape du nettoyage
 - → Si DM complexe : Tremper pour une durée d'au moins une heure, et répéter plus d'une fois, en alternance, le brossage et l'irrigation

¹Deux situations qui exigent de compléter un formulaire AH-223-1 et d'effectuer une analyse par les instances concernées afin de prévenir la récurrence d'un tel incident :

- Si le délai entre la fin de l'Intervention et le pré-nettoyage est plus d'une heure
- Si les DM sont utilisés en dehors des heures régulières et qu'ils ne peuvent être retraités complètement

